


NEW!


INSERITORE COLLARE "LINEARE" - COMPONENTIBILE

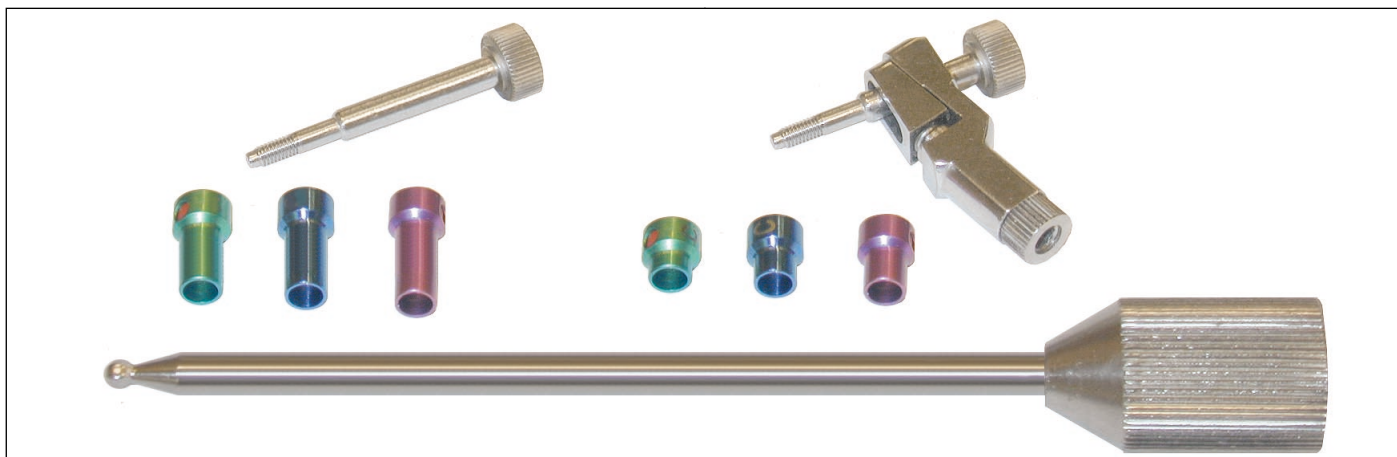

GENERALITÀ

Il sistema implantare Bone System prevede che il collare transmucoso definitivo sia inserito nel collo implanta- re per frizionamento, al fine di assicurare la massima stabilità alla connessione.

Il protocollo di inserimento del collare si completa con

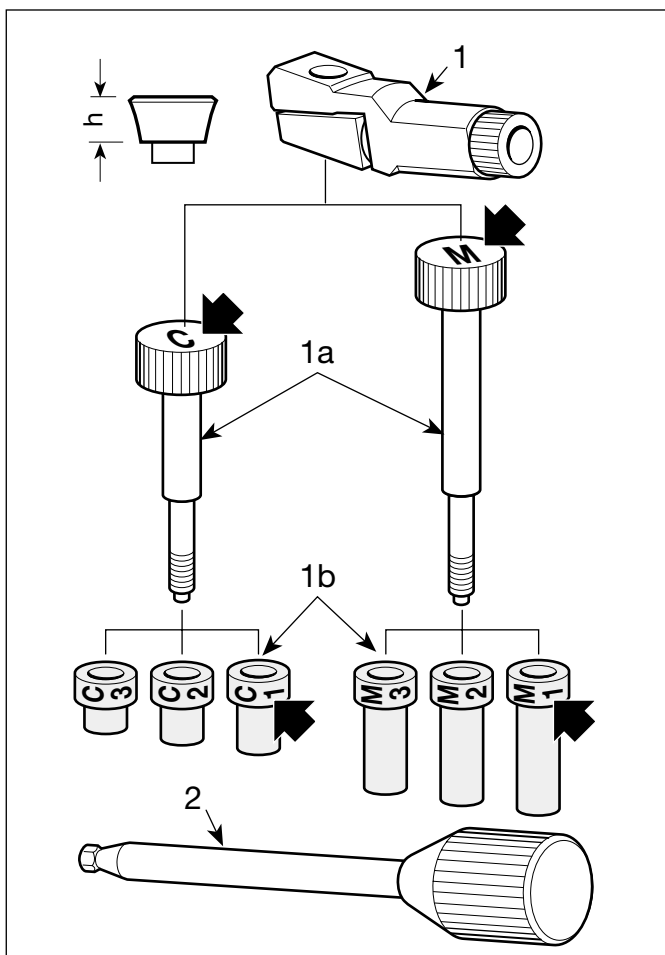

un nuovo strumento componibile, realizzato allo scopo di fornire agli utilizzatori un'alternativa agli inseritori "ad avvitamento", in modo da soddisfare esigenze diverse, derivanti da varie individualità operative.

Questo strumento rappresenta una evoluzione dei precedenti inseritori lineari (vedi News 0408), nel quale la componibilità dei vari elementi elimina la necessità di disporre di uno strumento specifico per ogni utilizzo, riducendo sensibilmente il costo relativo.

DESCRIZIONE

Caratteristica fondamentale dell'inseritore lineare è quella di portare all'esterno del cavo orale il punto di applicazione della forza necessaria all'inserimento, senza trasferire alcuna componente torsionale all'im- pianto osteointegrato.

Il principio di funzionamento consiste nello sfruttare la componente assiale della forza generata dall'avanza- mento di una slitta lungo un piano inclinato.

L'avanzamento della slitta avviene per mezzo di un manicotto a vite, azionato da un'apposita manopola.

Il nuovo inseritore componibile comprende diversi ele- menti, la cui composizione permette di affrontare ogni situazione anatomica:

- 1. Inseritore lineare** (Cod. 40160501);
- 1a. Perni centratori**, in due versioni (Corto - Cod. 40161201 e Medio - Cod 40161301), contrassegnati rispettivamente da "C" e da "M" sulla superficie del pomolo.
- 1b. Spintori**, in due serie, una per ciascun perno cen- tratore (corto o medio), composte ciascuna da tre elementi in diverse colorazioni, corrispondenti alle

tre altezze (h) di collari transmucosi (1 - 2 - 3 mm):

C1-porpora	- Cod. 40160801	Spintore corto per collari h = 1 mm;
C2-blu	- Cod. 40160701	Spintore corto per collari h = 2 mm;
C3-verde	- Cod. 40160601	Spintore corto per collari h = 3 mm;
M1-porpora	- Cod. 40161101	Spintore medio per collari h = 1 mm;
M2-blu	- Cod. 40161001	Spintore medio per collari h = 2 mm;
M3-verde	- Cod. 40160901	Spintore medio per collari h = 3 mm.

2. Manopola (Cod. 40161401) per l'azionamento manuale.

CAMPO D'APPLICAZIONE

L'inseritore lineare componibile permette l'inserimento di tutti i collari transmucosi Bone System delle serie "RT" e "ST", indipendentemente dal loro diametro.



È però indispensabile che venga sempre utilizzato nella composizione specifica per ciascuna altezza di collare, in quanto una composizione inadeguata rispetto all'altezza del collare o alla lunghezza del perno centratore può compromettere l'integrità delle parti interne dell'impianto, oltre a non produrre la completa discesa del collare transmucoso nel collo implantare.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Composto l'inseritore (in funzione dell'altezza del collare e del distretto anatomico), si infila il collare sull'estremità filettata del perno centratore e si porta l'inseritore in corrispondenza della vite implantare.


Si avvita completamente il perno nella vite implantare tramite il pomolo superiore, facendo in modo che, alla fine dell'avvitamento, lo strumento risulti orientato in una posizione favorevole per l'operatore.

Utilizzando la manopola inserita nell'apposita sede, si avvita in senso orario fino al completo avanzamento della slitta, con conseguente completa discesa del collare, avvertibile dall'arresto della slitta stessa.

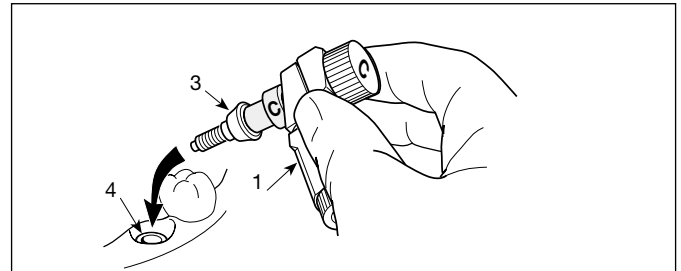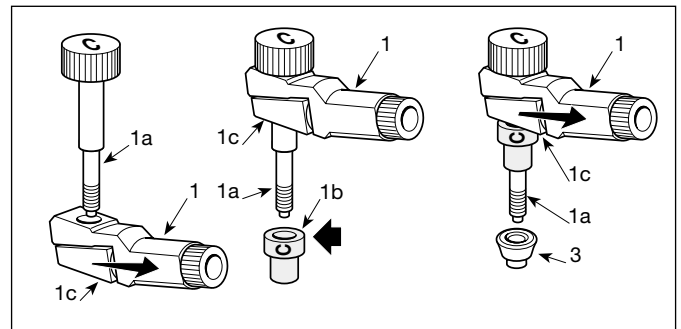

Dopo aver svitato di un giro la manopola per sbloccare la slitta, l'inseritore può essere facilmente rimosso dall'impianto svitando il pomolo superiore.

Dettagliate istruzioni d'uso sono inserite nella confezione del prodotto.

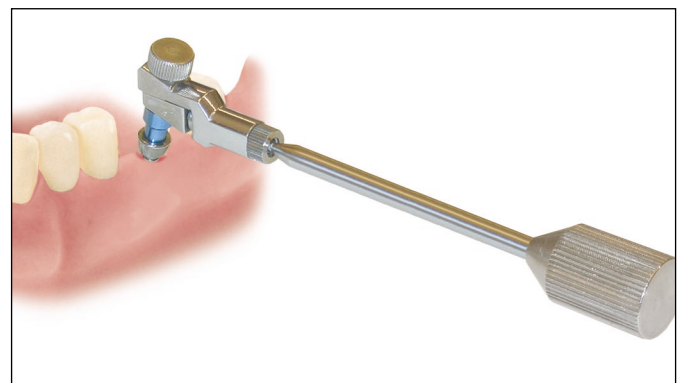

INFORMAZIONI COMMERCIALI

I componenti dell'inseritore lineare componibile sono classificati e commercializzati secondo la tabella:

Rif.	Codice	Conf.	Descrizione	Prezzo listino
1	40160501	1 pz	Corpo inseritore collare componibile	€ 85,00
1a	40161201	1 pz	Perno centratore corto	€ 20,00
	40161301	1 pz	Perno centratore medio	€ 20,00
1b	40160801	1 pz	Spintore corto per collare h=1	€ 10,00
	40160701	1 pz	Spintore corto per collare h=2	€ 10,00
	40160601	1 pz	Spintore corto per collare h=3	€ 10,00
	40161101	1 pz	Spintore medio per collare h=1	€ 10,00
	40161001	1 pz	Spintore medio per collare h=2	€ 10,00
	40160901	1 pz	Spintore medio per collare h=3	€ 10,00
2	40161401	1 pz	Manopola per inseritore lineare	€ 40,00